




OTSC® Proctology

OTSC® Proctology está compuesto por el aplicador con un clip pre-montado y de un mecanismo insertado dentro del canal de trabajo que permite tensar la sutura dentro del cap"

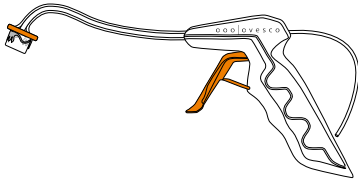

El aplicador se inserta de forma trans-anal donde pueda verse directamente. Al apretar el gatillo, el clip es liberado y empujado dentro del tejido desde el cap aplicador. Para facilitar la aplicación, generalmente las suturas con forma de U se colocan en el lugar designado. Éstas pueden ser tiradas a través del canal de trabajo por medio de un mecanismo que permite tensar la sutura dentro del cap.


Se puede utilizar alternativamente el OTSC® Proctology Anchor

a	b
Ancho área de compresión= ancho de clip 11 mm	Diámetro máximo del cap 23 mm

Accesorios de aplicación para OTSC® Proctology


8os instrumentos están disponibles para facilitar el uso OTSC® Proctology

 OTSC®
ANCHOR PR

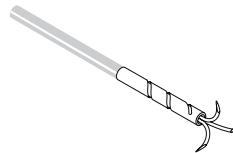


The OTSC® Proctology Anchor puede utilizarse para aproximar los tejidos con el cap aplicador en caso de que la aplicación sea difícil

 FISTULA
BRUSH PR

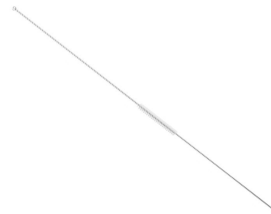


Fístula Brush puede ser utilizado para preparar la fístula; remover tejido, residuos y abrasiones existentes.

 OTSC®
CLIP CUTTER PR

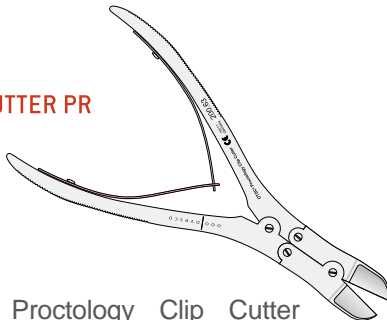

El OTSC Proctology Clip Cutter puede ser utilizado para cortar los clips y removerlos en caso de ser necesario.

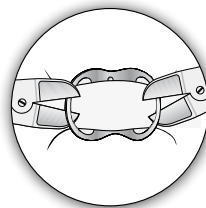

+56 2 23416606

info@zepeda.cl

WWW.ZEPEDA.CL